

КОНТРОЛЬ АСЛО–СРП–РФ Уровень “Н” (ASO-CRP-RF Control “H”) 1102115

Контрольная сыворотка для контроля правильности и воспроизводимости при определении АСЛО, СРП и РФ в сыворотке человека.

IVD (для диагностики in vitro)

Хранить при 2–8°C.

Код: 1102115 Control “H” 4x1 мл высокий уровень

Лот (№ партии): _____ Срок хранения (Exp. Date): _____

ХАРАКТЕРИСТИКА

Контроль представляет собой жидкую сыворотку человека для оценки точности и воспроизводимости при использовании турбидиметрического или нефелометрического методов определения АСЛО, СРП и РФ.

СОСТАВ

Контроль АСЛО–СРП–РФ. Control “H”	Человеческая сыворотка. С высокими патологическими концентрациями АСЛО, СРП и РФ.
--------------------------------------	---

ВНИМАНИЕ

Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был протестирован и дал отрицательный результат на HBsAg, HCV и антитела к ВИЧ (1/2) методами, одобренными FDA. Однако, обращаться с ним нужно как с потенциально опасным.

КАЛИБРОВКА

Значение концентраций контроля было стандартизовано по Референсному Материалу (CRM 470) для СРП, сыворотке от пациентов с ревматоидным артритом ВОЗ 64/1 для РФ и по 1-ому Международному Калибратору АСЛО ВОЗ для АСЛО.

ПОДГОТОВКА

Разведите содержимое (→) точно 1,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте, избегая образования пены. Выдержите при комнатной температуре около 10 минут перед использованием.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Контроль стабилен вплоть до указанной даты при температуре 2-8°C в плотно закрытой упаковке и без контаминации при использовании. Не использовать контроль после окончания срока годности.

После разведения стабилен до 10 дней при 2-8°C или 6 месяцев при –20°C.

ПРОЦЕДУРА

Для использования в турбидиметрических тестах.

Компонент	Метод	Значение	Диапазон	Ед.измерения
Антистрептолизин О (АСЛО)	Турбидиметрия	245	196 – 294	МЕ/мл
С-реактивный белок (СРП)		742	33 – 50	мг/л
Ревматоидный фактор (РФ)		46	37 – 55	МЕ/мл

Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона (эти значения могут отличаться в разных партиях).

